

【 Hydrogen Inhalation 専用鼻カニューラ ご使用方法 】


この度はHydrogen Inhalation device をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Hydrogen Inhalation 専用鼻カニューラは「接続チューブ」「分岐チューブ」「カニューラ」の3パーツで1セットです。

下図より接続方法をご参照の上、接続してからご使用ください。


ご使用上の注意をよく読んでご使用ください。

吸入器本体へ

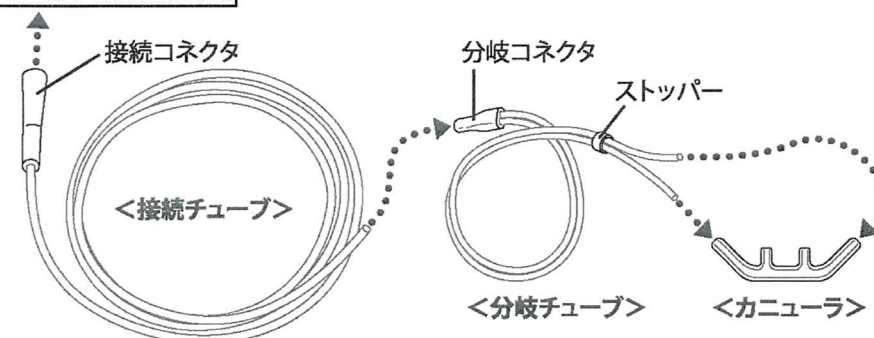

接続コネクタ
接続チューブ
分岐コネクタ
分岐チューブ
ストッパー
カニューラ

【装着方法】

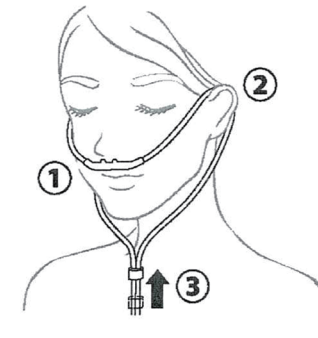

① ② ③

※まず、上記の3点がすべて揃っていることをご確認ください。
※上図のように、各接続位置(赤矢印)でしっかり差し込んで組み立ててください。

【ご使用上の注意】

- ・ご使用中は絶対にタバコを吸わないでください。
- ・消耗品ですので、2~3ヶ月で交換してください。
- ・長時間連続しての使用は避けてください。
- ・無理に曲げたりひっぱったりしないでください。
- ・カビ等の原因になりますので、水滴等付着したままにしないでください。
- ・使用後は十分乾かしてから保管してください。

本品は医療機器ではありません

医師の診断を受けている時や身体に異常を感じている時は、必ず医師に相談した上でご使用ください。

本品を使用中に身体に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止してください。